


Gehäuse AIVIA V3

Die vollständige Bedienungsanleitung für das AIVIA-Gerät finden Sie auf unserer Website <https://www.coeurwallis.ch/de/defibrillatoren-aed/bedienung-und-technische-informationen-328/>

Sobald das Gehäuse installiert und ordnungsgemäss an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die grüne Betriebsanzeige dauerhaft.

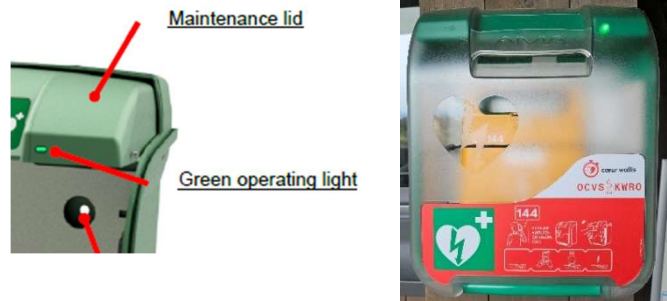

Öffnen des AIVIA V3-Gehäuses


Nach der Installation löst das Gerät beim Öffnen automatisch einen Alarm aus. Dieser Alarm soll die Aufmerksamkeit von Personen in der Nähe auf sich ziehen, um im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands (HKS) schnelle Hilfe zu ermöglichen und gleichzeitig potenzielle böswillige Handlungen zu verhindern.

Das Öffnen des Gehäuses löst keinen automatischen Anruf bei der Notrufnummer 144 aus.

Öffnen im Wartungsmodus

Wenn Arbeiten am Defibrillator erforderlich sind, kann das Gehäuse im Wartungsmodus geöffnet werden, sodass kein Alarm ausgelöst wird.

Dazu muss lediglich der mitgelieferte Magnet vor den Magnetdetektionsbereich gehalten werden. Daraufhin ertönt ein akustisches Signal, das anzeigt, dass der Deckel geöffnet werden kann.

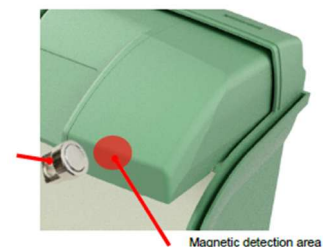

Rote Warnleuchte

Wurde das Gehäuse ausserhalb des Wartungsmodus geöffnet, leuchtet eine rote Kontrollleuchte auf, um darauf hinzuweisen. In diesem Fall muss das Gehäuse überprüft werden, um seinen Zustand und seine ordnungsgemässe Funktion sicherzustellen.



Um diese rote Warnleuchte auszuschalten, öffnen Sie die Tür im Wartungsmodus und halten Sie den Magneten 3 Sekunden lang vor den Magnetdetektionsbereich.

Es ertönen drei Signaltöne und die rote Warnleuchte erlischt.








Weitere Informationen zu den Anzeigen

Die rote Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn:

- Die Tür des AIVIA geöffnet wurde
- Die Temperatur im Gehäuse über 45 °C steigt oder unter 5 °C fällt
- Es einen Stromausfall gab

Das Blinken der grünen Kontrollleuchte zeigt an, um welche Situation es sich handelt.



Red warning light	Green light
	One flash of the green light indicates that the door has been opened: 
	Two flashes of the green light indicates that the temperature are exceeded: 
	Three flashes of the green light indicates that the power supply has been cut off during heating: 
	If multiple incidents trigger the red warning light, the green light flashes in sequences, with a 2-second pause. For example, for an open door and a temperature anomaly: 